

**HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA
FAMILIAR DR JOSE ANTONIO SALDAÑA**



PROCESOS DE ACTIVIDADES

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES

RESPONSABLE:

MARA SARAHI GARCIA DE ARRIAGA

ENFERMERA JEFE DE UNIDAD

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS

PERSONAL RESPONSABLE: TECNICOS DE ARCENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE DE UNIDAD

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">8</p>	<p>1 RECIBO DE MATERIAL CONTAMINADO EN VENTANILLA DE RECEPCION</p> <p>2 REVISAR Y CLASIFICAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL SEGÚN LISTADO</p> <p>3 REALIZAR Y ENTREGAR CONTRAVALE DE RECIBIDO</p> <p>4 COLOCAR INSTRUMENTAL EN DETERGENTE ENZIMATICO POR 15 MTOS</p> <p>5 REALIZAR CEPILLADO Y ENJUAGUE</p> <p>6 SECAR Y EMPAQUETAR EN DOBLE CUBIERTA SEGÚN LISTADO</p> <p>7 IDENTIFICARLO COLOCANDO NOMBRE DEL EQUIPO, FECHA DE PREPARACION, FECHA DE VENCIMIENTO, FIRMA Y CINTA TESTIGO</p> <p>8 TRASLADO AL AREA DE RESGUARDO DE EQUIPOS LIMPIOS Y PREPARADOS PARA EL PROCESO DE ESTERELIZACION.</p> <p>USO DE GUANTES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>	<p>➤ TABULADOR DE USO DE EQUIPOS QUIRURGICOS SEGÚN SERVICIO DE HOSPITALIZACION, SEGÚN VALE DE PEDIDO</p>	<p>➤ TECNICO EN ARSENAL</p> <p>➤ ENFERMERA(O) DE LA CENTRAL DE EQUIPOS</p>

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESINFECCION DE SUPERFICIES DE AREAS DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL TECNICO EN ARSENAL ,PERSONAL DE ENFERMERIA

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE DE UNIDAD

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
1 2 3 4	LAVADO DE MANOS AL ENTRAR ALA UNIDAD APLICAR SOLUCION DE BENZALCONIO EN SPRAY AL 0.1% Y ESPERAR EFECTO REISUAL POR 3 A 5 MINUTOS SECAR CON CAMPO ESTERIL LAVADO DE MANOS (CADA RECURSO REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE SEGÚN AREA ASIGNADA DIARIAMENTE) USO DE GUANTES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSOAL INDISPENSABLE	LIBRO DE REGISTRO	PERSONAL TECNICO Y DE ENFERMERIA

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE INSTRUMENTAL CONTAMINADO DELA CENTRAL QUIRURGICA

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS

PERSONAL RESPONSABLE: TECNICO EN ENFERMERIA,TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p>1 RECIBO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO A PERSONAL DE ENFERMERIA DEL CENTRO QUIRURGICO SEGUN LISTADO.</p> <p>2 COLOCACION DE INSTRUMENTAL EN SOLUCION ENZIMATICA POR 15 MIN</p> <p>3 CEPILLADO Y LAVADO DE INSTRUMENTAL</p> <p>4 SECADO DE INSTRUMENTAL,EMPAQUETADO EN DOBLE CUBIERTA SEGÚN LISTADO,IDENTIFICACION CON NOMBRE,FECHA DE PREPARACION,FECHA DE VENCIMIENTO,FIRMA Y CINTA TESTIGO</p> <p>5 TRASLADO AL AREA DE RESGUARDO DE MATERIAL LIMPIO Y PREPARADO PARA EL PROCESO DE ESTERELIZACION</p> <p>USO DE GUANTES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>	<p>TABULADOR DE ACTIVIDADES</p>	<p>➤ TECNICO EN ENFERMERIA</p> <p>➤ TECNICO EN ARSENAL</p>

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE MATERIAL TEXTIL

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL DE ENFERMERIA,TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>1 SELECCIÓN DE MATERIAL PARA CORTE(GASA,ALGODÓN)</p> <p>2 CORTE SEGÚN MEDIDAS A UTILIZAR</p> <p>3 ELABORACION DE MATERIAL TEXTIL(TORUNDAS,CURACIONES SIMPLES,CURACIONES CORTADAS,MECHAS VAGINALES,DISECTORES E HISOPOS)</p> <p>4 EMPAQUETAMIENTO DE CURACIONES SIMPLES CORTADAS TORUNDAS DE GASA E HISOPOS 3 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>5 ALAMCENAMIENTO EN DEPOCITOS CORRESPONDIENTES</p> <p>6 ESTERELIZACION SEGÚN DEMANDA DE CONSUMO</p> <p>USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>	<p>LIBRO DE PRODUCCION DIARIA</p>	<p>PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL</p>

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO DE ESTERELIZACION

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE ESTERELIZACIONES

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL DE ENFERMERIA, TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>1 ENSENDIDO DE AUTOCLAVE EN ANTECAMARA DE PRESION A 20 LIBRAS 2 CARGA DE CANASTA CON PAQUETES DE ROPA QUIRURGICA, CAJAS DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIAS MAYORES, EQUIPOS QUIRURGICOS DE USO EN LOS SERVICIOS DE ATENCION, EQUIPOS DE PARTO, MATERIALES DIVERSOS. 3 REGISTRO DE TODA LA CARGA A ESTERELIZAR EN LIBRO DE PRODUCCION 4 COLOCACION DE CANASTA DENTRO DE AUTOCLAVE 5 ACCIONAR CONPUERTA DE CERRADO E INICIO DEL PROCESO. 6 REGISTRO DE INICIO DEL PROCESO DE ESTERELIZACION 7 PROCESO DE ESTERELIZACION ES AUTOMATICO EN MODALIDAD DE PREVACIO MEDIANTE 7 SICLOS DURANTE 1 HORA 30 MINUTOS. 8 AL ACCIONARCE ALARMA DE FINALIZACION DEL PROCESO DE ESTERELIZACION ACCIONAR ABRIMIENTO DE CONPUERTA DEJAR ENFRIAR POR 15 A 20 MIN LUEGO RETIRAR CANASTA DE ANTECAMARA SEGUIDAMENTE DESCARGAR EQUIPOS ESTERILES Y ALMACENARLOS EN SU RESPECTIVA AREA</p>	<p>LIBRO DE CONTROL DE ESTERELIZACIONES</p>	<p>PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL</p> <p>USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE ROPA LIMPIA DEL AREA DE LAVANDERIA

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL DE ENFERMERIA, TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p>1 RECEPCION DE ROPA LIMPIA A PERSONAL DE LAVANDERIA</p> <p>2 REVICION SELECCIÓN Y DOBLADO DE ROPA SEGÚN TECNICA QUIRURGICA</p> <p>3 ELABORACION DE PAQUETES DE ROPA PARA CIRUGIA MAYOR, CIRUGIA MENOR EQUIPOS DE PROCEDIMIENTOS GINECO-OBSTETRICOS.</p> <p>4 SELECCIÓN Y EMPAQUETAMIENTO DE COMPRESAS ABDOMINALES Y GINECO-OBSTETRICAS.</p> <p>5 TRASLADO DE PAQUETES DE ROPA AL AREA DE RESGUARDO DE EQUIPOS Y PAQUETES PREPARADOS PARA EL PROCESO DE ESTERELIZACION.</p> <p>6 COLOCACION DE ROPA SOBRANTE EN STOCK DE ROPA LIMPIA. USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>	<p>LIBRO DE PRODUCCION DIARIA</p>	<p>PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL</p>

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA Y DESINFECCION DELA CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE,ENFERMERO GENERAL

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p>1 EVACUACION DE MOVILIARIO DE AREA</p> <p>2 BARRIDO DEL PISO Y RETIRO DE TELARAÑAS</p> <p>3 APLICACIÓN DE SOLUCION DE LEJIA Y RINZO AL 10% EN PAREDES Y PISO DEJANDO POR 15 MINUTOS EFECTO RESIDUAL</p> <p>4 RETIRO DE SOLUCION DE LEJIA Y RINZO DE PAREDES Y PISO CON AGUA ESTERIL</p> <p>5 APLICACIÓN DE SOLUCION DE BENZALCONIO EN PAREDES Y PISO Y DEJAR QUE SEQUE AL AIRE AMBIENTE</p> <p>6 LIMPIEZA DE MUEBLES CON SOLUCION DE BENZALCONIO Y ASI SUCECIVAMENTE CON LAS DIFENRENTES AREAS DE LA CENTRAL DE EQUIPOS CE UTILIZA COMPRESAS EN DESUSO PERO ESTERELIZADAS Y SE CAMBIAN CUBIERTAS DE MUEBLES.</p> <p>SE REALIZA TODOS LOS FINES DE SEMANA.</p> <p>USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE</p>	<p>LIBRO DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION</p>	<p>PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL</p>

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMPAQUETADO DE MATERIAL TEXTIL, EQUIPO DE USO INDIVIDUAL

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE ESTERELIZACIONES

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL DE ENFERMERIA Y TECNICOS EN ARSENAL

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE DE UNIDAD

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8	CORTE DE PAPEL KRAFT Y CREPADO EN DIFERENTES MEDIDAS CORTE Y SELLADO DE BOLSA GRADO MEDICO SELECCIÓN DE TEXTIL A EMPAQUETAR (torundas de gasa, curaciones simples, curaciones cortadas, torunda de algodón, hisopos) EMPAQUETADO DE MATERIAL TEXTIL SEGUN CANTIDAD ESTABLECIDA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL EMPAQUETADO CORTE DE PAPEL KRAFT PARA BOLSA DE ESPECULO INDIVIDUAL CORTE Y SELLADO DE BOLSA GRADO MEDICO EN DIFERENTES MEDIDAS PARA ESTERELIZACION DE MATERIAL CON FORMALDEHIDO ESTERELIZACION SEGÚN CONSUMO Y DEMANDA COLOCANDO CINTA TESTIGO Y FECHA DE CADUCIDAD. USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE	LIBRO DE PRODUCCION INDIVIDUAL	PERSONAL DE ENFERMERIA PERSONAL TECNICO EN ARSENAL

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE ANTONIO SALDAÑA
CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE AUTOCLAVES

UNIDAD RESPONSABLE: CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERELIZACIONES

PERSONAL RESPONSABLE: PERSONAL TECNICO Y DE ENFERMERIA

SUPERVISA: ENFERMERA JEFE DE UNIDAD

PASOS	ACTIVIDAD	REGISTROS	RESPONSABLE
1	LAVADO DE MANOS		
2	APLICAR AGUA BIDEUTILADA EN PAÑO ESTERIL		
3	REMOVER RESTOS DE PELUSAS, MOTA Y POLVO	LIBRO DE REGISTRO	PERSONAL TECNICO Y DE ENFERMERIA
4	PASAR PAÑO SE PARA RETIRAR EXCESO DE HUMEDAD		
5	PERSONAL DE AREA DE MAQUINAS DEBE USAR MASCARILLA Y GUANTES		
6	DICHO PROCESO SE DEBE REALIZAR TODOS LOS DIAS ANTES DE CONECTAR A TOMA CORRIENTE Y ENCENDER AUTOCLAVE		
	USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INDISPENSABLE		

Cadena de Infeccion



EPP AREA "A"



**USO OBLIGATORIO
DE GANTES**



**USO OBLIGATORIO
DE MANDIL**



**ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS
BOTAS AISLANTES**



**USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA**



**USO OBLIGATORIO
DE GAFAS
ANTISALPICADURA**

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES

EPP AREA "C"



**USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA**



**ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS
BOTAS AISLANTES**

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES

EPP AREA "B"



**USO OBLIGATORIO
DE GANTES**



**USO OBLIGATORIO
DE MANDIL**



**ES OBLIGATORIO
EL USO DE LAS
BOTAS AISLANTES**



**USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA**



**USO OBLIGATORIO
DE GAFAS
ANTISALPICADURA**

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIONES

“ATENCIÓN”





El presente documento, de procesos operativos de la central de equipos y esterilizaciones queda a disponibilidad del personal de dicha área en la disposición de ser cumplidos y de no ser así, ser sancionados según las prerrogativas que le conceden al cargo a la enfermera jefe del área.

Con una validez de cinco años a partir de su elaboración.

San salvado, los planes de Renderos, 25 de enero 2020